

Smart Blood Glucose

 User Manual



DERKA, YOUR
COMPANION IN
HEALTH!

دستگاه پایش قند خون

دفترچه راهنما



Derka BIOTECH®

فهرست مطالب

آشنایی با دستگاه

۲.....	مقدمه
۲.....	درباره دستگاه قندخون
۳.....	تجهیزات موجود در بسته بندی
۴.....	مشخصات محصول

نحوه استفاده از دستگاه

۹.....	نصب باتری و تنظیم زمان و تاریخ
۱۱.....	شروع آزمایش
۱۶.....	دسترسی به حافظه دستگاه
۱۷.....	محدوده مقادیر مورد انتظار
۱۸.....	محدودیت
۲۱.....	عیب یابی
۲۳.....	برچسب گذاری و اطلاعات
۲۴.....	راهنمای کار با اپلیکیشن درکابایوتک

درکا، همراه سلامتی

از اینکه دستگاه مانیتورینگ قند خون درکا را انتخاب کرده‌اید، صمیمانه سپاسگزاریم. این دفترچه راهنما برای کمک به استفاده صحیح و دقیق از دستگاه تهیه شده و شامل تمامی اطلاعات لازم برای دستیابی به نتایج قابل اعتماد در اندازه‌گیری قند خون است. لطفاً پیش از شروع استفاده، مطالب این دفترچه را با دقت مطالعه فرمایید.

دستگاه درکا توسط شرکت نوژان شیمی آزما طراحی، تولید و پشتیبانی شده است. ما در این شرکت به اهمیت پیشگیری زودهنگام و مدیریت هوشمند بیماری دیابت باور داریم و این سیستم را با همین دیدگاه توسعه داده‌ایم.

در صورت داشتن هرگونه سؤال، ابهام یا نیاز به راهنمایی بیشتر، می‌توانید با ما یا نماینده محلی تماس بگیرید. اطلاعات تماس در پشت جلد دفترچه درج شده است و تیم پشتیبانی ما آماده پاسخگویی به شماست.

درباره دستگاه قند خون

دستگاه درکا برای اندازه‌گیری قند خون، در نمونه خون مویرگی نوک انگشت و خون وریدی طراحی شده است. این دستگاه فقط برای استفاده خارج از بدن (in vitro) مناسب است و نباید برای آزمایش‌های داخل بدن استفاده شود.

توجه: برای اینکه نتیجه دقیق و قابل اعتماد باشد، لطفاً فقط از نوارهای تست مخصوص درکا استفاده کنید. استفاده از نوارهای دیگر ممکن است باعث خطا در اندازه‌گیری شود.

تست روزانه، گام اول سلامت

تجهیزات موجود در بسته بندی

کیف محصول دستگاه قند خون با طراحی منظم و کاربردی، مجموعه‌ای از اقلام ضروری را برای شروع پایش قند خون در اختیار کاربر قرار می‌دهد. این مجموعه شامل دستگاه اندازه‌گیری قند خون، قلم خون‌گیری، ۲۵ عدد سوزن لانس، یک عدد باتری، دفترچه راهنمای کاربر و کیف محافظ است. بسته‌بندی برخی مدل‌ها شامل نوار تست قند خون (۵۰ عددی) می‌باشد، در حالی‌که برخی دیگر فاقد نوار تست هستند. طراحی کیف به‌گونه‌ای است که حمل و نگهداری تجهیزات را آسان و ایمن ساخته، تا کاربر بتواند در هر زمان و مکان، پایشی دقیق و مطمئن از سطح قند خون خود داشته باشد.



عددها، زبان بدن شما هستند

مشخصات محصول

DERKA	سری نوار
۰.۵ میکرولیتر	۱. حجم خون
۵ ثانیه	۲. اندازه گیری زمان
خون کامل مویرگی و وریدی	۳. نوع نمونه خون
۷۰% - ۰	۴. محدوده هماتوکریت قابل قبول
۲۰-۶۰۰ (mg/dL) (۱.۱-۳۳.۳ mmol/L)	۵. محدوده اندازه گیری
mg/dL gmmol/L (قابل تعویض)	۶. واحد اندازه گیری
۱۰۰۰ نتیجه بازمان و تاریخ	۷. ظرفیت حافظه
۲۴ ساعت	۸. نمایش زمان
۱۰-۴۰ درجه سانتی گراد	۹. محدوده دمای عملیاتی
زیر ۹۵ درصد	۱۰. محدوده عملیاتی رطوبت نسبی
۵۰-۰ درجه سانتی گراد	۱۱. شرایط نگهداری دستگاه
زیر ۹۵ درصد	۱۲. محدوده رطوبت نگهداری دستگاه
۸۵*۶۴*۱۷,۵ میلی متر	۱۳. ابعاد
کمتر از ۵۰ گرم	۱۴. وزن
یک باتری لیتیومی ۳ ولتی (CR ۲۰۳۲)	۱۵. منبع تغذیه


توجه:

لطفاً قبل از شروع استفاده از سیستم، تمام دستورالعمل های این کتابچه را به دقت بخوانید. راهنمایی والدین برای استفاده از کودکان زیر ۱۸ سال توصیه می شود.

کنترل قند یعنی کنترل زندگی

دستگاه قند خون




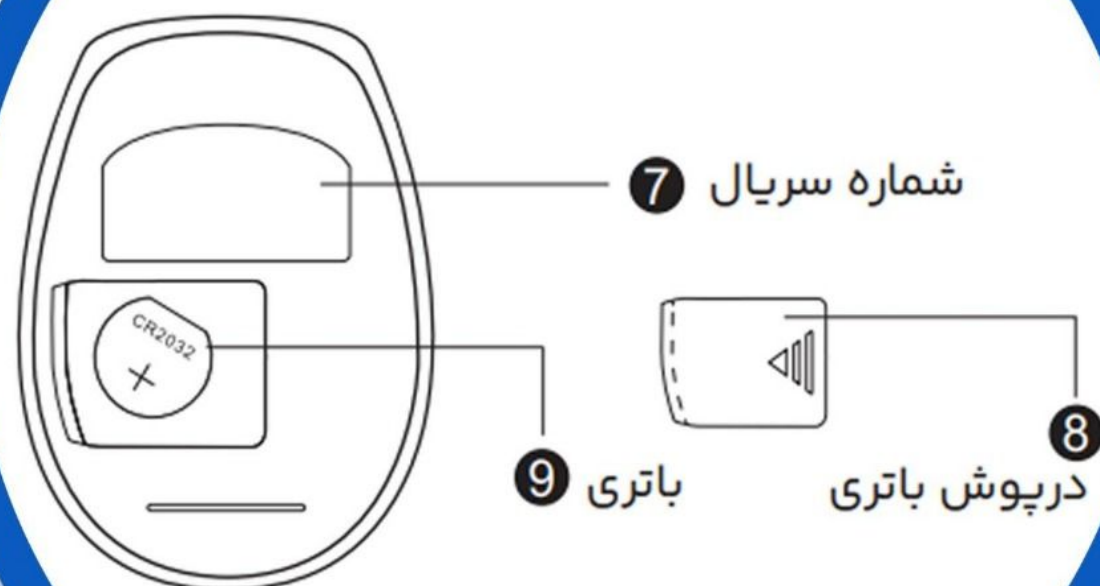



صفحه نمایش دستگاه

1. نماد حافظه
2. نماد کد
3. ترموگراف
4. علامت باتری
5. علامت قطره خون

6. واحد اندازه گیری : mmol/L
7. واحد اندازه گیری : mg/dL
8. تاریخ
9. زمان

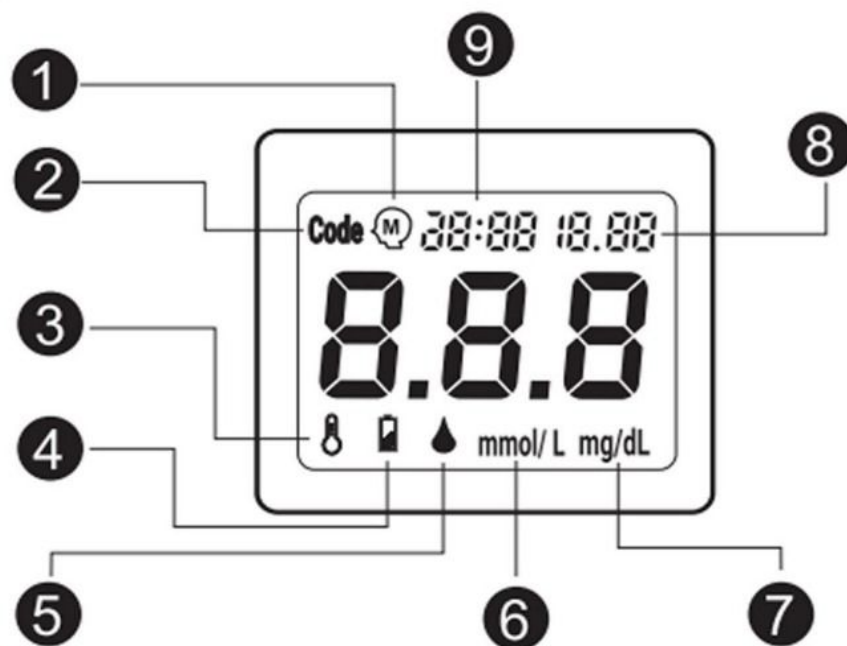

- ## شکاف

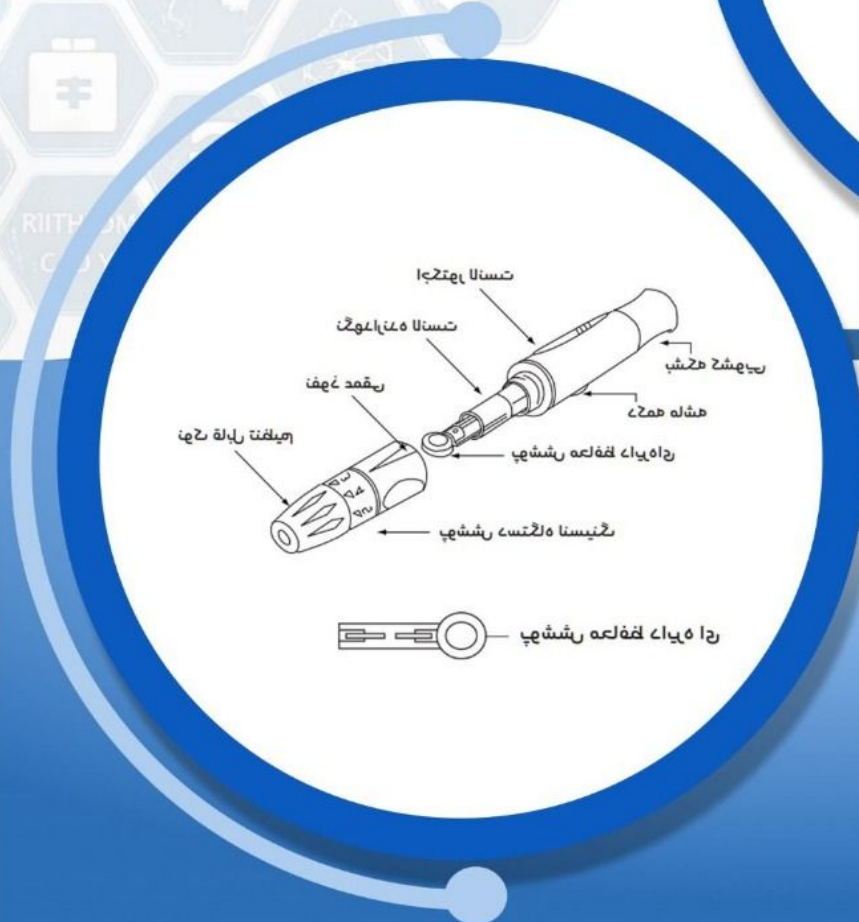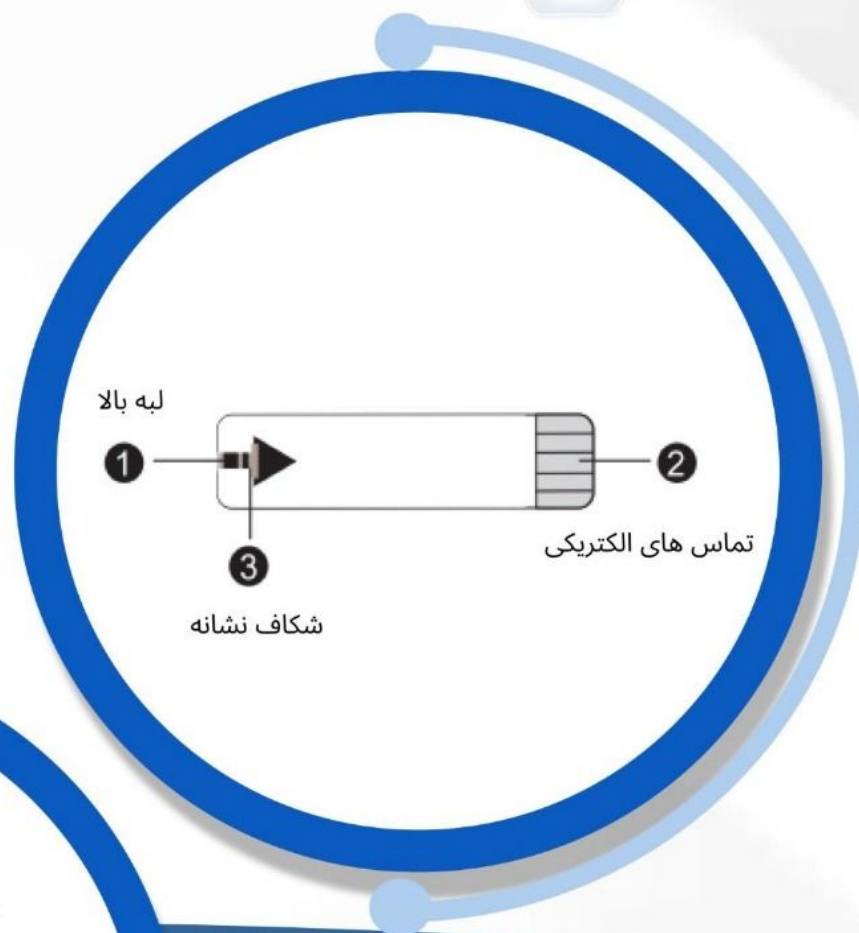

نصب باتری و تنظیم زمان و تاریخ

زمان و تاریخ باید قبل از انجام آزمایش و هر بار که باتری تعویض می‌شود، تنظیم گردد. تنظیم صحیح زمان و تاریخ برای بررسی نتایج ذخیره‌شده در حافظه اهمیت دارد.

مرحله ۱. درپوش باتری را باز کنید، یک باتری لیتیومی CR۲۰۳۲ با ولتاژ ۳ ولت قرار دهید و درپوش را ببندید.



مرحله ۲. دکمه تنظیم (SET) را پیدا کرده و چند ثانیه نگه دارید تا وارد حالت تنظیم شوید.



مرحله ۳. عدد سال چشمک‌زن می‌شود، با فشردن دکمه، سال درست را انتخاب کنید.



توجه: زمان به صورت ۲۴ ساعته تنظیم می‌شود

مراقبت آسان با یک قطره خون

نصب باتری و تنظیم زمان و تاریخ

- مرحله ۴. دکمه را دوباره فشار دهید تا به مرحله بعد بروید
- مرحله ۵. عدد ماه چشمک زن می شود، ماه را تنظیم کنید.
- مرحله ۶. دوباره دکمه را فشار دهید تا روز چشمک بزند، روز را انتخاب کنید.
- مرحله ۷. مرحله بعد تنظیم ساعت است، ساعت را تنظیم کنید.
- مرحله ۸. سپس دقیقه ها چشمک می زنند، دقیقه درست را وارد کنید.
- مرحله ۹. پس از تنظیم زمان، دکمه را ۳ ثانیه نگه دارید تا بتوانید واحد اندازه گیری را تغییر دهید.
- مرحله ۱۰. واحد را بین mg/dL یا mmol/L تغییر دهید.
- مرحله ۱۱. در پایان، دکمه را یکبار دیگر فشار دهید تا عبارت «OFF» ظاهر شود.
- مرحله ۱۲. با ظاهر شدن «OFF»، تنظیمات ذخیره شده و دستگاه از حالت تنظیم خارج می شود.
- مرحله ۱۳. دستگاه آماده استفاده است.


توجه: وقتی شارژ باتری کم است، علامت باتری روی صفحه نمایش داده می شود. برای تعویض باتری مراحل بالا را دنبال کنید.

توجه: اگر برای مدتی از دستگاه استفاده نمی کنید، لطفاً باتری را از سوکت باتری خارج کنید تا از نشتی و آسیب به دستگاه جلوگیری کنید.


هر تست، یک تصمیم آگاهانه

شروع آزمایش


مرحله ۱: درپوش قلم خون‌گیری را بردارید.

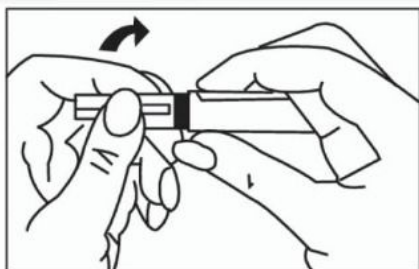

مرحله ۲: یک سوزن لانس را در نگهدارنده قلم قرار داده و فشار دهید تا در جای خود قرار گیرد.

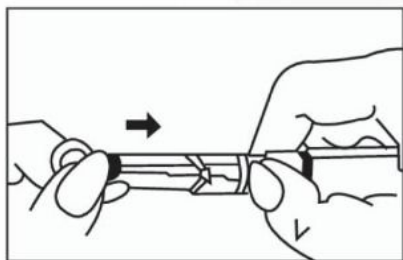


مرحله ۳: درپوش محافظ دایره‌ای شکل سوزن را باز کرده و آن را جدا کنید.

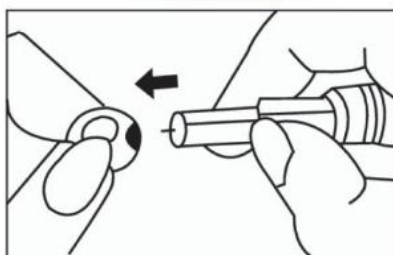


مرحله ۴: درپوش قلم خون‌گیری را مجدداً سر جای خود بگذارید.

مرحله ۵: عمق نفوذ قلم را تنظیم کنید (۵ سطح وجود دارد؛ سطح ۱ برای پوست‌های نازک‌تر مناسب است).

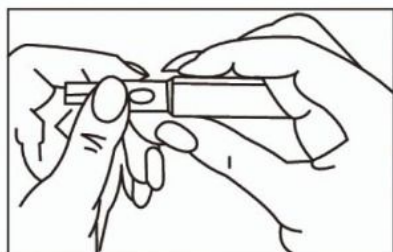


دستگاه کوچک، تأثیر بزرگ


ادامه آزمایش

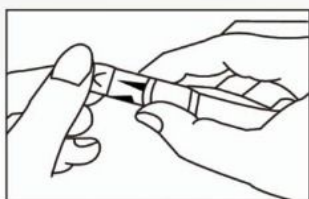

مرحله ۶: با چرخاندن تنظیم‌گر عمق، میزان دلخواه را انتخاب کنید.

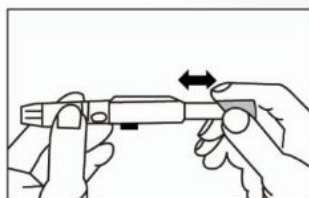

مرحله ۷: کنترل کشویی قلم را به عقب بکشید تا آماده شلیک شود.

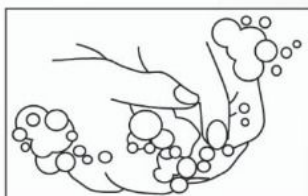


مرحله ۸: دستان خود را با آب گرم و صابون بشویید و کاملاً خشک کنید.

مرحله ۹: یک نوار تست از قوطی خارج کرده و بلافاصله درب قوطی را

ببندید.


مرحله ۱۰: مطمئن شوید علامت مثلث روی نوار تست رو به بالا است. سپس نوار را تا انتها در شیار دستگاه قرار دهید تا علامت قطره خون روی صفحه ظاهر شود.

مرحله ۱۱: دستگاه به صورت خودکار روشن می‌شود و شماره کد نمایش داده می‌شود. بررسی کنید این شماره با کد روی قوطی نوارها مطابقت داشته باشد.

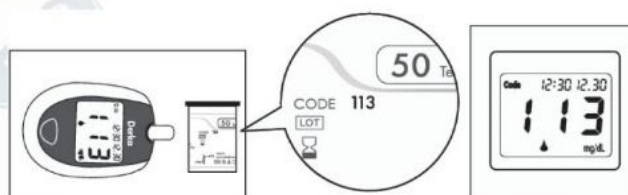

آگاهی، آغاز سلامتی است

ادامه آزمایش

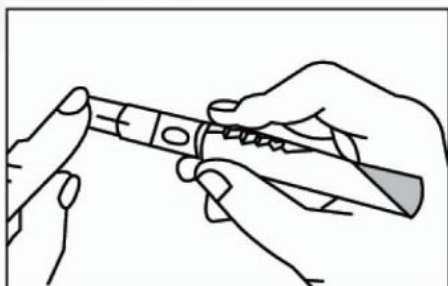

مرحله ۱۲: انگشت خود را روی میز قرار دهید و نوک قلم را روی آن بگذارید.

مرحله ۱۳: دکمه شلیک قلم خون‌گیری را فشار دهید تا سوزن وارد پوست شود.

مرحله ۱۴: برای به‌دست آوردن یک قطره خون، انگشت را به‌آرامی از پایین به بالا فشار دهید تا قطره‌ای کوچک تشکیل شود.

مرحله ۱۵: قطره خون را به ناحیه نیم‌دایره‌ای بالای کانال باریک نوار تست لمس کنید. خون به‌صورت خودکار وارد نوار می‌شود. شکاف نشانه باید کاملاً از خون پر شود. اگر کامل پر نشد، خون بیشتری اضافه نکنید و از نوار جدید استفاده کنید.



مرحله ۱۶: انگشت خود را روی نوار نگه دارید تا صدای بوق دستگاه را بشنوید.


توجه: لطفاً خون را از بالا نریزید.

دقت بالا، آرامش بیشتر

ادامه آزمایش

مرحله ۱۷: شمارش معکوس از ۵ ثانیه آغاز می‌شود.

مرحله ۱۸: پس از شمارش معکوس ، نتیجه آزمایش روی صفحه نمایش داده می‌شود و به‌طور خودکار در حافظه ذخیره خواهد شد

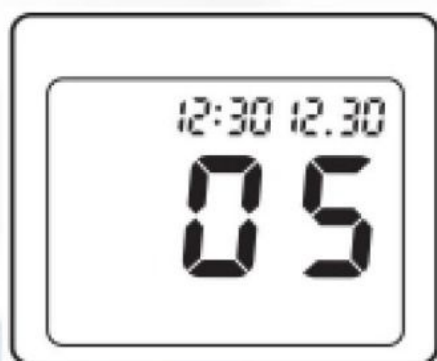


مرحله ۱۹: با خارج کردن نوار تست، دستگاه به‌صورت خودکار خاموش می‌شود.


زمان‌بندی تست، کلید تحلیل دقیق

ادامه آزمایش


مرحله ۲۰: نوار استفاده شده را در ظرف دربسته بیندازید.

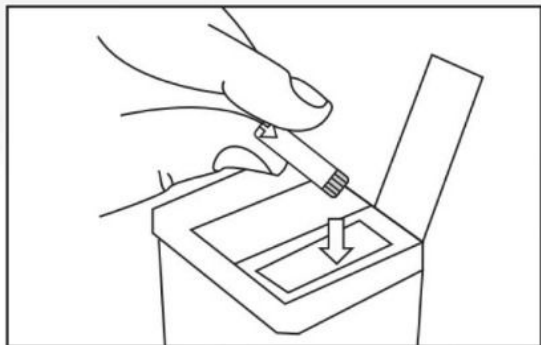

مرحله ۲۱: درپوش را از قلم خون گیری بردارید و درپوش محافظ را دوباره روی سوزن لانسیت بگذارید،

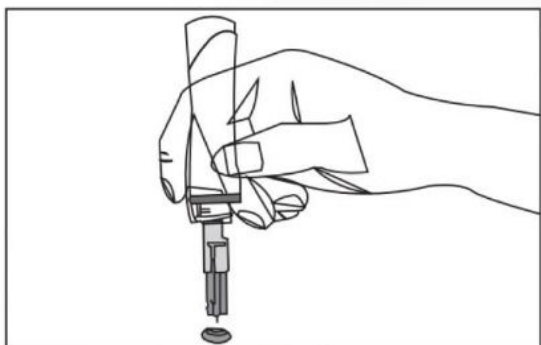

مرحله ۲۲: دکمه اجکتور را به جلو فشار دهید تا سوزن لانسیت خارج شود.
سوزن استفاده شده را در ظرف ایمن دربسته بیندازید و سپس آن را دور بیندازید.

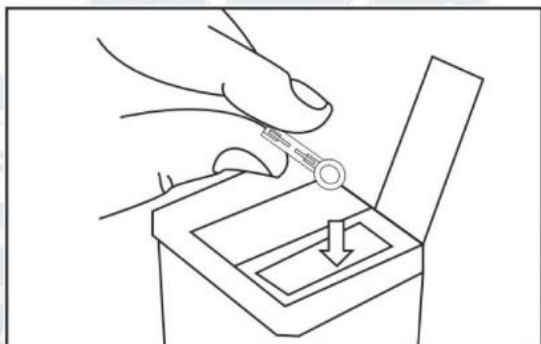


ثبت نتایج، مسیر بهتر درمان

دسترسی به حافظه دستگاه


دستگاه قند خون شما نتایج ۱۰۰۰ تست اخیر قند خون را به همراه تاریخ و زمان در حافظه ذخیره می‌کند. وقتی حافظه پر شود، جدیدترین نتیجه جایگزین قدیمی‌ترین نتیجه خواهد شد. مراحل مشاهده نتایج ذخیره‌شده:

مرحله ۱: برای ورود به حالت حافظه، دکمه دستگاه را فشار دهید.

• عبارت روی صفحه شروع به چشمک‌زدن می‌کند و سپس آخرین نتیجه قند خون همراه با تاریخ و زمان نمایش داده می‌شود.

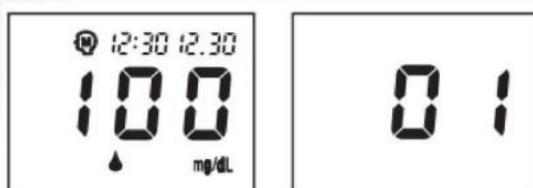

مرحله ۲: دوباره دکمه را فشار دهید تا نتیجه دوم نمایش داده شود.

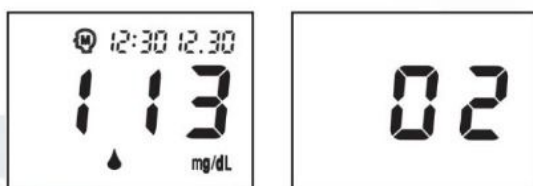

مرحله ۳: با تکرار فشار دادن دکمه، می‌توانید تمام ۱۰۰۰ نتیجه ذخیره‌شده را مشاهده کنید.

مرحله ۴: پس از نمایش قدیمی‌ترین نتیجه، عبارت "OFF" روی صفحه ظاهر می‌شود.



تست منظم، ذهن آسوده

محدوده مقادیر مورد انتظار

کنترل قندخون نیازمند کمک متخصصان بهداشت برای تعیین محدوده مورد انتظار مقادیر قندخون شما، تنظیم دفعات آزمایشات و بحث در مورد معنای نتایج گلوکز خون شما نیاز داد. مقدار مورد انتظار قندخون برای افراد بدون دیابت ۱:

ناشتا و قبل از غذا: کمتر از ۱۰۰ میلی گرم در دسی لیتر (۵/۶ میلی مول در لیتر)

۲ ساعت بعد از غذا: کمتر از ۱۴۰ میلی گرم در دسی لیتر (۷/۸ میلی مول در لیتر)

توجه: به یاد داشته باشید که اگر نتیجه آزمایش خارج از محدوده مورد انتظار قرار گرفت، آزمایش را تکرار کنید.

اگر نتیجه غیر منتظره ای دریافت کردید:

خوانش قند خون پایین یا بالا می تواند نشان دهنده یک وضعیت پزشکی بالقوه جدی باشد. لطفاً با متخصص مراقبت های بهداشتی خود مشورت کنید و توصیه های درمانی او را دنبال کنید.

نگهداری درست، عملکرد دقیق

محدودیت

- هنگامی که محدودیت‌های زیر رعایت شوند، دستگاه قند خون نتایج دقیقی ارائه می‌دهد.
- نوارهای تست نباید برای نوزاد استفاده شوند.
- نوارهای تست فقط برای یکبار مصرف طراحی شده‌اند — از نوار استفاده‌شده دوباره استفاده نکنید.
- با احتیاط از دستگاه استفاده کنید. دستگاه را رها نکنید یا فشار زیاد به آن وارد نکنید.
- دستگاه را باز نکنید.
- از کارت کالیبراسیون دستگاه‌های دیگر استفاده نکنید.
- دستگاه را روی سطح سرد یا گرم قرار ندهید.
- در صورت عدم استفاده، همیشه دستگاه را در کیف مخصوص نگهداری کنید.
- دستگاه را دور از گرد و غبار یا کثیفی نگهدارید.
- دستگاه را در آب نیندازید و اجازه ندهید آب وارد آن شود. این کار می‌تواند باعث نتایج نادرست شود، حتی اگر دستگاه خشک شود.
- هنگامی که اندازه‌گیری در حال انجام است، نوار تست را جدا نکنید.
- اگر سطح دستگاه کثیف شد، می‌توانید آن را با پارچه نرم و الکل ۷۰٪ به آرامی پاک کنید، اما مراقب باشید که مایع وارد شکاف تست یا درگاه‌ها نشود.
- نوارهای آزمایشی فقط برای استفاده با خون کامل مویرگی تازه از انگشت طراحی شده‌اند.
- از سرم یا پلاسما استفاده نکنید.
- در مورد مقدار هماتوکریت خود با پزشک یا متخصص مراقبت‌های بهداشتی مشورت کنید.

نوار تازه، نتیجه معتبر

محدودیت

- حدود ۲۰ دقیقه قبل از استفاده از دستگاه صبر کنید تا دمای آن با محیط تنظیم شود.
- غفلت از این کار ممکن است منجر به نتایج نادرست آزمایش شود.
- دستگاه را در نزدیکی تلویزیون، مایکروویو یا تلفن همراه استفاده نکنید، زیرا ممکن است اختلال الکترومغناطیسی ایجاد شود.
- از تابش مستقیم نور خورشید به دستگاه خودداری کنید.
- ارتفاعات تا ۸۰۰۰ پا تأثیری بر اندازه‌گیری دستگاه قند خون درکا ندارند.
- نتایج نادرست ممکن است در افرادی با فشار خون شدید یا شوک دیده شود.
- نتایج نادرست پایین ممکن است در افرادی با وضعیت هیپرگلیسمی-هیپراسمولار (با یا بدون کتوز) رخ دهد.
- بیماران بدحال نباید با دستگاه قند خون آزمایش شوند.
- هنگام کار با خون از اقدامات احتیاطی جهانی استفاده کنید. تمام نمونه‌ها و مواد آلوده باید به‌گونه‌ای مدیریت شوند که گویی قابلیت انتقال عفونت را دارند.
- دستگاه باید در محیطی با رطوبت کمتر از ۹۵٪ استفاده شود.
- دمای پیشنهادی کار دستگاه بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) است.
- اگر دما به زیر ۴ یا بالاتر از ۴۲ درجه سانتی‌گراد برسد، دستگاه به‌صورت خودکار خاموش می‌شود.
- دستگاه باید مطابق دستورالعمل WEEE بازیافت شود.
- هنگام دور انداختن همه مواد، دستورالعمل‌های ایمنی و زیست‌محیطی محلی را رعایت کنید.

دست تمیز، تست مطمئن

محدودیت

- این دستگاه برای استفاده در حضور مخلوط بیهوشی قابل اشتعال با هوا، اکسیژن یا اکسید نیتروژن مناسب نمی باشد.
- تداخل با پرالیدوکسیم یدید، جنتیسیک اسید، هموگلوبین و گلوکاتیون

توجه: لطفا جدول زیر را برای غلظت های خاصی که می تواند بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد ببینید.

بدون تداخل	ماده
میلی گرم در دسی لیتر 20 <	استامینوفن
میلی گرم در دسی لیتر 10 <	کراتینین
میلی گرم در دسی لیتر 0.09 <	دوپامین
میلی گرم در دسی لیتر 15 <	گالاکتوز
میلی گرم در دسی لیتر 2 <	اسید جنتیزیک
میلی گرم در دسی لیتر 70 <	گلوکاتیون
میلی گرم در دسی لیتر 800 <	هموگلوبین
میلی گرم در دسی لیتر 250 <	مالتوز
میلی گرم در دسی لیتر 10 <	یدید پرالیدوکسیم
میلی گرم در دسی لیتر 23 <	اسید اوریک


باتری سالم، دستگاه فعال

عیب یابی

جدول زیر خلاصه‌ای از تمام پیام‌های نمایشی دستگاه است. این جدول به شما کمک می‌کند مشکلات احتمالی را شناسایی و رفع کنید. توجه داشته باشید که ممکن است هر بار با بروز مشکل، پیام خطا ظاهر نشود. استفاده نادرست از دستگاه می‌تواند بدون هشدار خطا یا نماد خاصی، نتیجه نادرست ایجاد کند.



پیام	علت	اقدام
	دستگاه غیرطبیعی است	دستگاه نیاز به تعمیر دارد. لطفاً با نماینده ما تماس بگیرید
	قدرت باتری کم است	با یک باتری لیتیومی ۳ ولتی Cr2032 تعویض کنید
	دمای اطراف خیلی کم (۴ - ۹ درجه سانتیگراد) یا خیلی زیاد (۴۱ تا ۴۲ درجه سانتیگراد) انجام تست	آزمایش را در مکانی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) تکرار کنید
	بدون شارژ باتری دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود	با یک باتری لیتیومی ۳ ولتی Cr2032 تعویض کنید
	هنگامی که دما به کمتر از ۴ درجه سانتیگراد (۳۹٫۴ درجه فارنهایت) برسد، دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود	آزمایش را در مکانی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) تکرار کنید
	دمای اطراف برای انجام آزمایش خیلی زیاد است	آزمایش را در مکانی بین ۱۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۵۰ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) تکرار کنید

حافظه دستگاه، همراه تحلیل شما

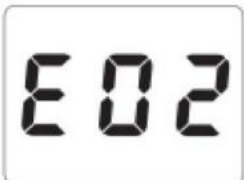پیام	علت	اقدام
	سطح قندخون شما بالاتر از ۶۰۰ mg/dL (۳۳.۳ mmol/L) می باشد	سطح قندخون خود را مجدداً بررسی کنید. اگر دوباره "HI" نمایش داده شد، لطفاً فوراً با پزشک خود تماس بگیرید
	سطح قندخون شما کمتر از ۲۰ میلی گرم در دسی لیتر (۱٫۱ میلی مول در لیتر) است	سطح قندخون خود را مجدداً بررسی کنید. اگر LOW دوباره نمایش داده شد، لطفاً فوراً با پزشک خود تماس بگیرید.
	نوار تست، استفاده شده و یا مرطوب است	لطفاً از یک نوار تست جدید استفاده کنید

تست را به عادت روزانه تبدیل کنید

برچسب گذاری و اطلاعات

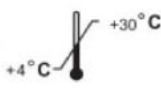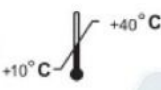تولید کننده 	مجدد استفاده نکنید 
شماره سریال SN	خشک نگه دارید 
شماره لات LOT	تاریخ مصرف 
دستگاه پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی IVD	برای استفاده با دستورالعمل‌ها مشورت کنید 
بازیافت کاغذ 	احتیاط کنید و به اسناد همراه مراجعه فرمایید. 
لطفا دستگاه را دور نریزید 	محدودیت دمای فروشگاه  $+4^{\circ}\text{C}$ $+30^{\circ}\text{C}$
	محدودیت دمای عملیاتی  $+10^{\circ}\text{C}$ $+40^{\circ}\text{C}$
	دور از نور خورشید نگهداری شود 

نوسان کمتر، زندگی بهتر

راهنمای کار با اپلیکیشن درکابیوتک

درکابیوتک یک اپلیکیشن هوشمند سلامت است که به صورت اختصاصی برای پایش، ثبت و تحلیل نتایج تست قند خون طراحی شده است. این نرم افزار با اتصال به دستگاه تست قند خون از طریق فناوری NFC و استفاده از هوش مصنوعی، به کاربران کمک می کند وضعیت سلامت خود را بهتر درک کرده و توصیه های شخصی سازی شده دریافت کنند.



مرحله ۱. ورود با شماره موبایل

- پس از نصب اپلیکیشن وارد صفحه ی ورود می شوید.
- شماره موبایل خود را وارد کنید.
- یک کد تأیید برای شما پیامک می شود.
- کد را در اپلیکیشن وارد کرده و وارد حساب کاربری شوید.

مرحله ۲. انجام تست قند خون با دستگاه

- دستگاه تست قند خون را روشن کنید.
- نوار تست را در دستگاه قرار دهید.
- با استفاده از سوزن مخصوص یک قطره خون روی نوار بچکانید.
- منتظر بمانید تا دستگاه نتیجه را اندازه گیری کند (معمولاً ۵ تا ۱۰ ثانیه).
- پس از ثبت نتیجه در حافظه دستگاه، گوشی خود را برای اتصال آماده کنید.

انتقال سریع اطلاعات با یک لمس NFC

راهنمای کار با اپلیکیشن درکابایوتک

مرحله ۳. اتصال NFC با نزدیک کردن گوشی به دستگاه

- از منوی اپلیکیشن وارد بخش اتصال NFC شوید.
- در صورتی که NFC گوشی شما فعال نیست اپلیکیشن به شما هشدار می دهد تا آن را روشن کنید.
- گوشی را به دستگاه تست قند خون نزدیک کنید (معمولاً در پشت گوشی نزدیک به محل چپ (NFC)
- اپلیکیشن به صورت خودکار ارتباط برقرار کرده و اطلاعات قند خون را از دستگاه دریافت می کند.

مرحله ۴. تجزیه و تحلیل نتیجه تست قند خون با هوش مصنوعی

- پس از دریافت اطلاعات قند خون دکمه تحلیل با هوش مصنوعی را بفشارید.
- چند ثانیه صبر کنید تا تحلیل انجام شود.
- پاسخ شامل وضعیت قند خون عادی، پایین، بالا، بحرانی، عوامل مؤثر و توصیه های تغذیه ای و سبک زندگی نمایش داده می شود.
- تحلیل هوش مصنوعی در بخش خلاصه سلامت ذخیره شده و همیشه قابل مشاهده است.

شما می توانید نرم افزار درکا بایوتک را از وبسایت Derkabiotech.com و یا از اپلیکیشن های کافه بازار دانلود نمایید.

با اعتماد، مسیر سلامتی را طی کنید